

Montering af Goliat Excel:



Goliat skubbes ind under stolen ved hjælp af monteringsstangen, og fastgøres i monteringsbeslagene på kørestolen.



Goliat færdig monteret i monteringsbeslagene på kørestolen. Monteringsstangen kan demonteres.



Drivhjuls-aktiveringspedal aktiveres ved et tryk med foden.



Goliat Excel fuldt monteret og klar til brug.



Goliat Excel

Brugermanual

Demontering af Goliat Excel:



Drivhjuls-aktiveringspedal deaktiveres ved et løft med foden



Goliat demonteres fra monteringsbeslagene på kørestolen ved hjælp af udløserpedalerne og monteringsstangen



Medico Nord A/S

Dybdalvej 11 • Gudumholm • DK-9280 Storvorde • tel. +45 98 31 69 66 • fax. +45 98 31 69 22
email@mediconord.dk • www.mediconord.dk



Medico Nord A/S

Dybdalvej 11 • Gudumholm • DK-9280 Storvorde • tel. +45 98 31 69 66 • fax. +45 98 31 69 22
email@mediconord.dk • www.mediconord.dk

Forord:

Goliat Excel er en lille stærk hjælpemotor til påspænding på kørestolen.

Goliat Excel er til stor hjælp for den person, der skubber kørestolen.

Goliat Excel betjenes via en håndstyring, der monteres på skubbehåndtagene.

Anvendelsesformål:

Goliat Excel gør det lettere for en hjælper at skubbe kørestolen, da dette kan gøres uden brug af kraft, samtidig kan motoren let af monteres så kørestolsbrugeren selv kan køre kørestolen.

Goliat Excel passer til de fleste krydsramme og komfortkørestole.

Konformitetserklæring:

Som producent erklærer Van Os Medical BV at Excel Klik&Go (Excel Goliat) hjælpemotor opfylder alle norm og krav i de 93/42/EEG nævnte forskrifter.

Certifikat nummer O2C01170RPT01.

Service og reparationer:

Service og reparationer af Goliat Excel hjælpemotor må kun udføres af autoriseret Excel forhandler. Skulle der opstå problemer, kontakt da venligst Excel forhandleren.

Deres autoriserede Excel forhandler:

Medico Nord A/S

Dybdalvej 11

DK-9280 Storvorde

Tel. +45 98 31 69 66 – Fax +45 98 31 69 22

www.mediconord.dk - email@mediconord.dk

Levering og klargøring før brug:

Goliat Excel er som regel monteret på vores værksted, så vi altid sikrer at Goliat Excel virker optimalt ved ibrugtagningen.

Goliat Excel er ved levering derfor klar til at tage i brug, så det er bare at klikke Goliat Excel på og køre. (Se bruger vejledning på bagerste side.)


Garanti:

Der er 24 måneders reklamationsret og 12 måneders garanti fra købsdatoen på Goliat Excel. Garantien omfatter ikke misvedligehold eller sliddele.

Goliat Excel må eksempelvis ikke bruges i vand eller i sand da dette kan skade motoren og derved bortfalder garantien.

Brugervejledning:

Goliat Excel leveres som komplet enhed med tilhørende monteringsstang, håndstyring og batterilader kit.

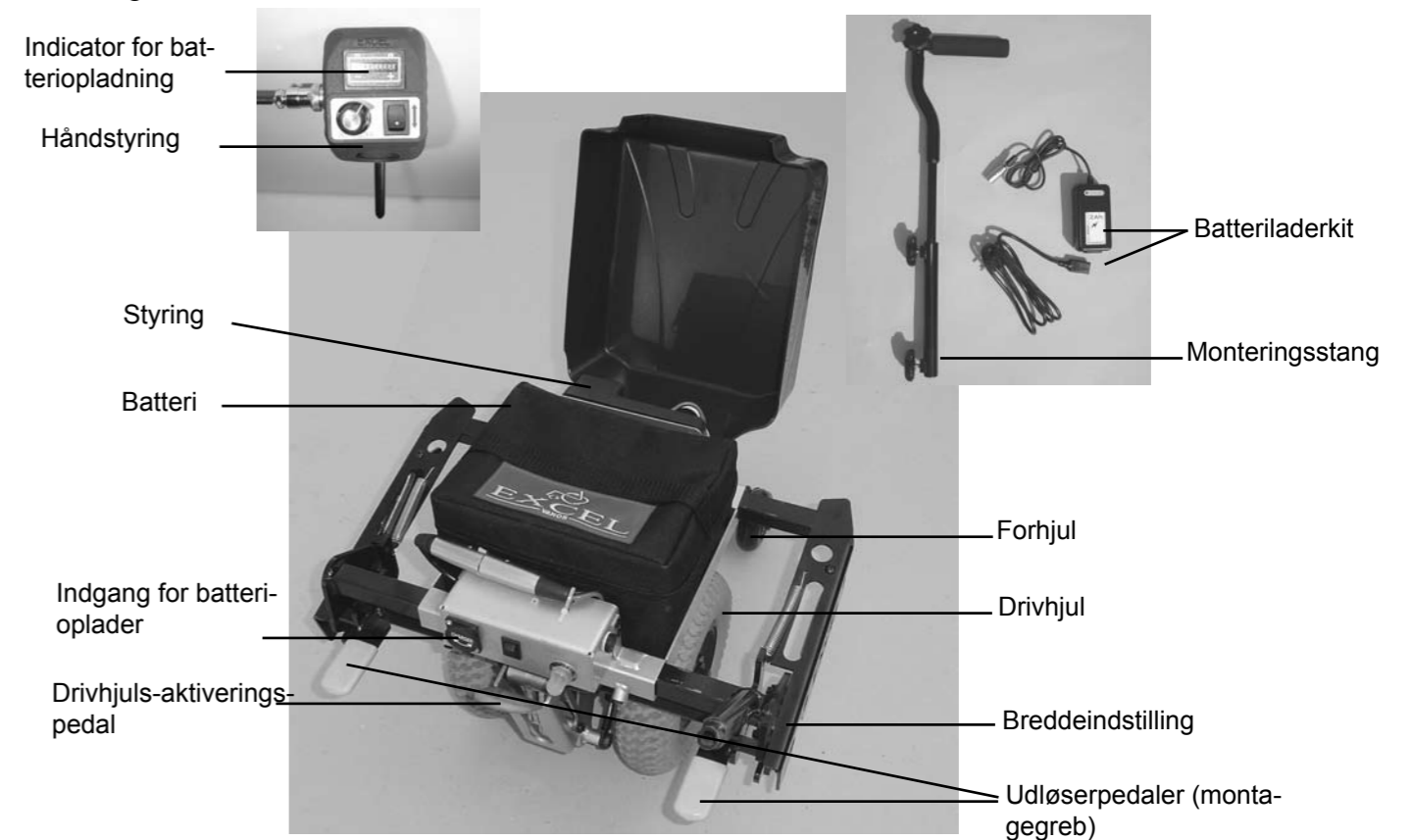

Kørestolen skal være forsynet med monteringsbeslag for fastgørelse af Goliat Excel. (Som regel monteret af Medico Nord A/S)

Opladning af batteri:

Batteriet oplades ved hjælp af batteriladerkit. Inden Goliat Excel anvendes for første gang skal batteriet oplades. Indikator i håndstyringen angiver når fuld opladning er foretaget. Goliat Excel vil på et fuldt opladet batteri have en rækkevidde på ca. 16 km.

